

How To Make

作り方 カンタン4STEP

STEP
1



水を入れる

裏面に空いている穴のうち一番かかと側の穴ひとつにシリンジを差し込み、水を8cc程度を注入します。

※他の穴から注入する必要はありません。

STEP
2



よく揉む

両方のインソールに水を入れたら、かかと部分から土踏まず部分にかけてよく揉み、水を行き渡らせるようにします。

STEP
3



靴に入れて着用する

普段履いている靴(スニーカー等)のインソールを取り外し、水でつくるインソールを入れます。

※インソールを取り外せない靴での利用は推奨しておりません。

STEP
4



座って10分待つ

靴を履いたまま、椅子に座って適切な姿勢(足首と膝の関節が90度、膝と膝の間に拳一つ入る幅)を保ちます。足は力を抜いて床においたまま10分お待ちください。この間に特殊素材が足の形に固まります。

製品仕様

あなたの足型で固まるフルカスタムメイド

日本製

付属品：注水用シリンジ

サイズ：16～30cm

(靴のサイズが 0.5cm 刻みの場合は、1つ大きいサイズをご選択ください。)



- ・日本人の足型に最適化した設計
- ・ニュートラルポジション基準の採型

本製品はオープン価格です。

販売者

株式会社 Orthofit

〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-16-12 NKビル 7F

お問い合わせ 03-6276-9984

(受付時間：土・日・祝日を除く 9:00～16:30まで)

ご購入はこちらから▶



米国足病医認定 米国式カスタムインソール

あなた専用の
水でつくるインソール



ORTHOFIT

「オースファット」

Certified by US Podiatrist

MADE IN JAPAN